




QuikRead go[®] HbA1c

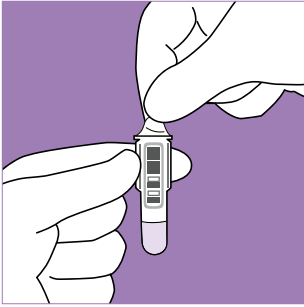


1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

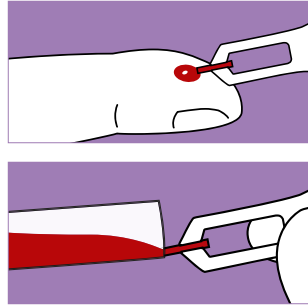


2 Pidä QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenotinta lähes vaakatasossa ja ota näyte asettamalla kärki juuri näytteen pinnan alle. Täytä näytteenottimen kapillaari-osa kokonaan.

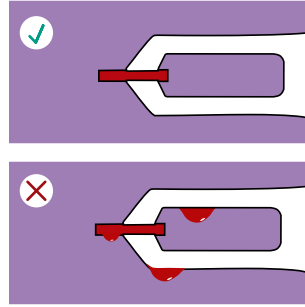


Huom! Tarkista, että kapillaariosa on täynnä. **Älä pyyhi näytteenotinta!** Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin.

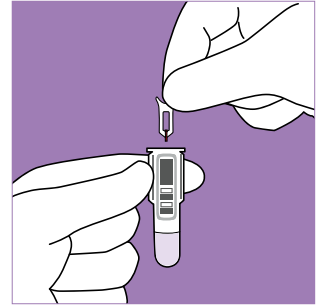

3 Laita näytteenotin kyvetiin 1 minuutin kuluessa näytteenotosta. Näytteenotin ei koske kyvetissä olevaa nestettä.

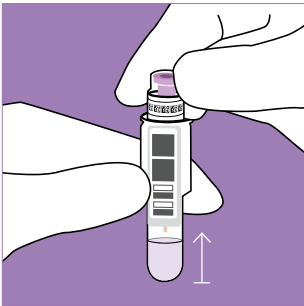

4 Sulje kyvetti huolellisesti HbA1c-reagenssikorkilla. Älä paina korkin liilaa sisäosaa alas. Tee testi 5 minuutin sisällä. **Pidä kyvetti pystysuorassa äläkä ravista.**

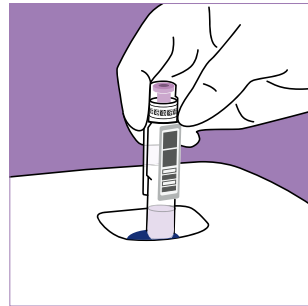

5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä **Mittaus**. Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



6 Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go[®] HbA1c



Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–8 °C:n lämpötilassa:
pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.
Avaamaton pakkaus 18–25 °C:n lämpötilassa: **2 kuukautta**.



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–8 °C: pakkauksen **viimeiseen käyt-
töpäivämäärään saakka**. Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen
jälkeen: säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **2 kuukautta**.



Avattu
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi (18–25 °C) ennen testin
suorittamista. Testi tulee tehdä **1 tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta.
Näyte säilyy korkilla suljetussa kyvetissä **5 minuutin** ajan.



Reagenssi-
korkit

Avaamaton putkilo 2–8 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään**
saakka. Avaamisen jälkeen 2–8 °C: **6 kuukautta** / 18–25 °C: **2 kuukautta**.



Näytteen-
ottimet

Säilytys 2–25 °C: QuikRead go Sample Collector 1µl -pakkauksen
viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.



HbA1c-
kontrollit

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **50 päivää**.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset:

Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510 tai
asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi / www.quikread.com

Tuote	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go HbA1c, 25 testiä sis. QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenottimet	151058	1703578
QuikRead go HbA1c Control Set	154520	1703579
QuikRead go -laite	135867	-
QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenottimet	154457	1703580