



### Kvalitetskontroller

easy CRP    wrCRP    wrCRP+Hb    CRP    CRP+Hb    CRP (101)

		easy CRP	wrCRP	wrCRP+Hb	CRP	CRP+Hb	CRP (101)
Mellomverdier (~25 mg/l)	153764 QuikRead go CRP Control <b>NEW</b>	✓	✓	✓	✓	✓	
	153038 QuikRead go wrCRP Control		✓	✓			
	68296 QuikRead CRP Control				✓	✓	✓
Høye verdier (~75 mg/l)	153763 QuikRead go CRP Control High <b>NEW</b>	✓	✓	✓	✓	✓	
	153039 QuikRead go wrCRP Control High		✓	✓			
	137071 QuikRead go CRP Control High				✓	✓	
Lave verdier (~2.5 mg/l)	153765 QuikRead go CRP Control Low <b>NEW</b>	✓	✓	✓			
	68257 Ultrasensitive CRP Control		✓	✓			
	153656 QuikRead go Hb 10 µl Control			✓			
Hb (~125 g/l)	141154 QuikRead go Hb Control					✓	

✓ Anbefalt

✓ Eget

Regelmessig bruk av [kvalitetskontroller](#) anbefales.

### HbA1c



154520 QuikRead go HbA1c Control Set **NEW**

### iFOBT



06027 QuikRead FOB Positive Control  
152390 QuikRead go iFOBT Control Quantitative

### Strep A



Strep A Positive and Negative Control  
(inkludert i testkitet)

**QuikRead go**®

Epost for bestillinger: [ordre@aidian.no](mailto:ordre@aidian.no)

[www.aidian.no](http://www.aidian.no) / [www.quikread.com](http://www.quikread.com) / [www.tacklearm.com](http://www.tacklearm.com)

# Bruk av QuikRead go kvalitetskontroller

## Generell informasjon

Alle QuikRead go-kontroller er klare til bruk.

Håndter kontrollen som en pasientprøve og analyser den som Kvalitetskontroll slik at resultatet lagres som en kontrollmåling.

Bland godt, risting av kontrollen kan forårsake luftbobler.

Vær oppmerksom på utløpsdato, lagringstemperatur og stabilitet på kontrollen ved bruk.

La kontrollen oppnå romtemperatur før bruk. Som et unntak kan HbA1c-kontrollene brukes direkte fra kjøleskapet.

Se instruksjonene for mer informasjon.

## Oppbevaring

	Uåpnet kontroll	Åpnet kontroll
CRP-kontroller	2-8°C	2-8°C: 2 måneder
Hb-kontroller	2-8°C	2-8°C: 1 måned
HbA1c-kontroll	2-8°C	2-8°C: 50 dager
FOB positiv kontroll	2-8°C	2-8°C: til utløpsdato
iFOBT kvantitativ kontroll	2-8°C	2-8°C: 1 måned
Strep A-kontroller	2-25°C	2-25°C: 12 måneder

## Tester med sample collector prøvetakingsenhet

- Samle kontrollprøven med sample collector pekende mot ytterflaten av kontrollvæsken.
- Forsikre deg om at kapillærdelen er fullstendig fylt
- Prøv på nytt hvis det er luftbobler eller rammen er farget med kontroll
- Ikke tørk av prøvetakeren



## Tester med kapillærrør

- Fyll kapillærrøret til den hvite stopperen
- Sørg for at det ikke er luftbobler
- Husk å tørke av kapillærrøret



## Tester med prøvetakingsrør

- Fyll den medfølgende pipetten med iFOBT kvantitativ kontrolløsning opp til nedre del av oppsamleren
  - Forsikre deg om at det ikke er bobler
  - Tøm pipetten ved å klemme på oppsamleren
- 
- Bruk 2 dråper FOB positiv kontroll i stedet for tre dråper fra prøvetakingsrøret



## Tester med prøvetakingspinne

- Tilsett 2 dråper kontrollvæske i ekstraksjonsrøret

